

# CureApp HT 初期設定ガイド

## step 1 アプリのダウンロードと処方コード入力

### 1 アプリをダウンロード

QRを読み取ってアプリをダウンロードしてください。

ダウンロードはこちらから



### 2 ダウンロードしたアプリを開く

[はじめての方] を押してください。



### 3 処方コードの読み取り


処方コードの入力、またはQRを読み取ってください。

処方コード  
または  
QR読み取り



### 処方コードはここに控えておくくと便利です!

※アプリ使用中にトラブルが発生した際は、CureApp カスタマーサポートにこちらの処方コードをお伝えいただくとスムーズです。  
CureApp カスタマーサポート連絡先は最後のページをご確認ください。

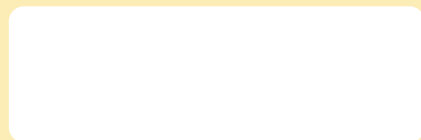

## 1 あなたの情報をアプリに入力

- お名前（ニックネーム）
- 性別
- 生年月
- 身長
- 体重



こちらのニックネームで  
呼ばさせていただきますね。

アプリ内キャラクター：千里（ちさと）

## 2 血圧値を入力

治療を開始するきっかけとなった  
血圧値を入力

不明の場合はチェックを入れます。

これで初期設定完了です！



ホーム画面上部の黄色いバーからアカウント登録できます。

アプリに関する重要なお知らせの受信や、機種変更の際のデータ引き継ぎ、トラブル発生時にアプリが使えなくなることを避けるため、アカウント登録をお願いいたします。



### 1 アカウント登録をはじめる

[アカウントを登録する] を押してください。



### 2 メールアドレス登録

メールアドレスを入力してください。



### 3 メールで確認番号を確認

②で登録したメールアドレス宛に確認番号が送られますのでご確認ください。

こちらに書かれている数字が確認番号です。



### 4 確認番号入力

アプリを起動し、確認番号を入力してください。



**これでアカウント登録完了です！**

## よくあるご質問

**Q** 処方コードの有効期限が切れてしまった。どうしたらいい？

**A** 医療機関に連絡して、期限の延長を依頼すると使えるようになります。

**Q** タブレットでも使えますか？

**A** CureApp HTはスマートフォンでのみご利用いただけます。  
対応OS:iOS14以上、Android 8.0以上

## 安心サポート 困った時はご相談ください

webでいつでもさっと解決

専用ヘルプセンター

アプリ左上の  
☰ [メニュー]を開き、  
[よくある質問]を選択



<https://help.ht.cureapp.com/hc/ja>

ht ヘルプセンター

CureApp カスタマーサポートに  
相談しながら解決

受付時間：月～金 9:00-17:00 (祝祭日・年末年始を除く)

☎ 電話相談窓口

03-6778-7280

✉ メール相談窓口

[cureapphelp@cureapp.jp](mailto:cureapphelp@cureapp.jp)



承認番号:30400BZX00100000

製造販売業者:株式会社CureApp

販売名:CureApp HT 高血圧治療補助アプリ

区分:管理医療機器

HT00694P01 2024年6月作成

取扱説明書を必ず読み、医師の指導に従って正しく使用してください。



00000020000040